

Clearblue®

Test de Grossesse Digital Ultra Précoce



Pour autodiagnostic. Lire attentivement cette notice avant d'effectuer le test.



Test possible jusqu'à
6 jours
avant le retard
de vos règles!



Si vous faites le test
avant la date présumée de
vos règles, utilisez les
premières urines du matin.
Sinon, vous pouvez faire le test
à tout moment de la journée.



Évitez de boire
beaucoup de
liquide avant
d'effectuer le test



Ne maintenez jamais
le bâtonnet de test
avec la tige
absorbante orientée
vers le haut

1 Réalisation du test

Retirez le bâtonnet de test de son emballage aluminium, ôtez le capuchon et utilisez-le immédiatement. Effectuez le test soit :



sous votre
jet d'urine

OU



immerger
jusqu'ici

dans un
échantillon
d'urine recueilli

Retirez la tige absorbante de l'urine lorsque le voyant d'arrêt
COMMENCE à clignoter.

Cela prend généralement environ 5 secondes. Le voyant continue de clignoter brièvement, puis s'éteint. Maintenez le bâtonnet de test avec la tige absorbante orientée vers le bas, remettez le capuchon en place et posez le bâtonnet à plat.

2 Attente

Le compte à rebours Smart Countdown s'affiche à l'écran, et chaque segment apparaît successivement pour indiquer que le test est en cours.



Si le compte à rebours Smart Countdown ne s'affiche pas, reportez-vous à la section << Erreur de test >>.

3 Lecture de votre résultat

Le compte à rebours Smart Countdown se termine en 1 à 5 minutes, puis votre résultat s'affiche à l'écran.

Enceinte



Vous pouvez être sûre à plus de 99 % du
résultat de votre grossesse, quel que soit le
moment où vous effectuez le test.

Reportez-vous à la question 1 pour plus d'informations.

Pas enceinte



Si vous avez fait le test tôt, il est possible que vous
soyez quand même enceinte, car le taux d'hormones
augmente rapidement au début de la grossesse.

Reportez-vous à la question 2 pour plus d'informations.

Questions et réponses

Mon résultat est << Enceinte >>. Que dois-je faire ?

Consultez votre médecin, qui pourra vous conseiller sur les démarches à suivre. Il est possible d'obtenir un résultat positif et de découvrir plus tard que vous n'êtes plus enceinte. Reportez-vous à la question 6. Le résultat << Enceinte >> reste affiché à l'écran pendant une durée maximale d'un mois.

Mon résultat est << Pas enceinte >>. Qu'est-ce que cela signifie ?

Il est possible que vous ne soyez pas enceinte, ou que le taux d'hormone de grossesse ne soit pas encore assez élevé pour être détecté. Faites un nouveau test dans trois jours. Si ce résultat est toujours << Pas enceinte >> et que vos règles n'ont pas commencé, consultez votre médecin.

À quel moment puis-je faire le test ?

Ce test peut être utilisé jusqu'à 6 jours avant le retard de vos règles (soit 5 jours avant la date présumée de vos règles).

Si votre résultat est << Enceinte >>, vous pouvez être sûre à plus de 99 % du résultat, quel que soit le moment où vous effectuez le test.

Cependant, comme les taux d'hormones varient d'une femme à l'autre et peuvent être très bas au début de la grossesse, il est possible que vous soyez enceinte tout en obtenant un résultat négatif. Le tableau ci-dessous indique le pourcentage de grossesses détectées en laboratoire lors d'essais cliniques menés sur des urines de début de grossesse :

Jours avant le retard de vos règles	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Détection de grossesses	>99%	>99%	>99%	99%	93%	78%

Comment fonctionne Clearblue ?

Le test détecte l'hormone de grossesse hCG (gonadotrophine chorionique humaine) dans les urines. La sensibilité du test est de 10 mIU/ml. Il est fiable à plus de 99 % lors de tests en laboratoire à partir de la date présumée de vos règles.

Les médicaments ou les maladies peuvent-ils fausser le résultat ?

Si vous prenez un médicament, lisez toujours la notice du fabricant avant d'effectuer le test. Les médicaments contenant de l'hCG et certaines maladies rares peuvent entraîner des résultats faux positifs.

Une grossesse ectopique (extra-utérine) ou récente, même si elle a été interrompue, peut donner des résultats erronés. Si vous êtes ménopausée ou en pré-ménopause, vous pouvez obtenir un résultat << Enceinte >> erroné alors que vous ne l'êtes pas.

Le test ne doit PAS être influencé par les thérapies hormonales contenant du citrate de clomifène, les analgésiques, l'alcool, les antibiotiques ou la pilule contraceptive. Si vous obtenez un résultat inattendu, consultez votre médecin.

J'ai obtenu un résultat << Enceinte >> précédemment, mais j'ai refait le test et obtenu un résultat négatif, ou mes règles ont commencé. Qu'est-ce que cela signifie ?

Il est possible d'obtenir un résultat positif et de découvrir plus tard que vous n'êtes finalement pas enceinte. C'est ce qu'on appelle une << fausse couche précoce >>, qui n'est malheureusement pas rare et touche environ 1 grossesse sur 4. Heureusement, la plupart des femmes mènent une grossesse normale et saine par la suite.

Élimination du test

Retirez les piles avant de jeter le bâtonnet de test. Les piles doivent être jetées conformément à la filière de recyclage appropriée. Pour les retirer, insérez l'extrémité incurvée du capuchon dans la fente située sur le côté du bâtonnet, puis tournez pour l'ouvrir.

Attention : Les piles ne doivent pas être démontées, rechargées ou incinérées. Jetez le reste du bâtonnet conformément à la filière de recyclage des équipements électriques et électroniques (DEEE). Les équipements électriques ne doivent pas être incinérés.

! Erreur de test



Erreur d'exécution

Une erreur est survenue pendant le test. Cela peut être dû au fait que :

- La tige absorbante n'a pas été maintenue orientée vers le bas.
- Le bâtonnet de test n'a pas été posé à plat après l'application de l'urine.
- Trop ou trop peu d'urine a été appliquée sur la tige.

Faites un nouveau test à l'aide d'un autre bâtonnet, en suivant attentivement les instructions.



Écran vide

Si le compte à rebours Smart Countdown ne s'est pas affiché ou ne s'est pas lancé après le prélèvement, et que l'écran est ensuite devenu blanc, vous devez effectuer un autre test. Faites un nouveau test à l'aide d'un autre bâtonnet, en suivant attentivement les instructions.

www.clearblue.com

Notre Service Conseil est à votre écoute du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00. (Note de localisation : En France, les appels sont pris en charge directement en français).

0 805 540 267 Appel gratuit depuis un poste fixe.

Tous les appels sont enregistrés et peuvent être écoutés à des fins de contrôle qualité. Veuillez avoir en votre possession le produit et son emballage, y compris les sachets aluminium, lorsque vous nous contactez.

Notice du test Clearblue Digital Ultra Précoce avec mention « CB15 » imprimée sur l'emballage. Pour autodiagnostic à domicile. Pour usage diagnostic in vitro exclusivement. Ne pas avaler. Ne pas réutiliser. Conserver hors de portée des enfants. Conserver entre 2 °C et 30 °C. Si le test a été stocké au réfrigérateur, laissez-le revenir à température ambiante pendant 30 minutes avant de l'utiliser. Ne pas utiliser si l'emballage aluminium est endommagé. Ne pas utiliser après la date de péremption. Contient de petits éléments. Ne pas ingérer les composants de ce dispositif. En cas d'ingestion accidentelle, consultez un médecin. Signalez à Clearblue tout incident lié à l'utilisation de ce produit.

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genève, Suisse.

Ce dispositif de diagnostic in vitro (DIV) digital répond aux exigences d'émission et d'immunité de la norme EN 61326-2-6. Les mesures de protection CEM intégrées à cet instrument électronique offrent une protection raisonnable contre les effets des interférences électromagnétiques susceptibles de survenir dans un environnement domestique. Les avertissements préventifs suivants s'appliquent aux équipements conformes à la norme EN 61326-2-6.

- L'utilisation de cet instrument dans un environnement sec, en particulier en présence de matières synthétiques (vêtements synthétiques, tapis, etc.), peut provoquer des décharges d'électricité statique nuisibles susceptibles d'entraîner des résultats erronés.
- N'utilisez pas cet instrument à proximité de sources de rayonnements électromagnétiques intenses (par ex. des téléphones portables), car celles-ci risquent d'en perturber le bon fonctionnement.

	Fabricant		Ne pas réutiliser
	Dispositif médical de diagnostic in vitro		À utiliser avant le
	Limite de température 2-30 °C		Code du lot

Clearblue est une marque déposée de SPD.

© 2021 SPD. Tous droits réservés.



*78 % des résultats de grossesse peuvent être détectés 6 jours avant le retard de vos règles (soit 5 jours avant la date présumée de vos règles).

23000616.02 08-2021

0123