

USAGE PRÉVU

Le test de grossesse précoce Proov Check est un test immunochromatographique qualitatif visuel in vitro destiné à la détection rapide de la gonadotrophine chorionique humaine (hCG) dans l'urine pour permettre la détection précoce de la grossesse. L'urine doit être recueillie dans une tasse – le test n'est pas destiné à une utilisation dans le jet d'urine. Pour utilisation en vente libre (OTC).

CONTENU

Chaque test contient un test rapide basé sur l'immunochromatographie par flux latéral. Le test contient une combinaison d'anticorps, y compris un anticorps monoclonal anti-hCG qui détecte sélectivement les niveaux élevés d'hCG. Lorsque le test est effectué en trempant le bâtonnet de test dans un échantillon d'urine, l'échantillon est transporté par capillarité et réagit avec le conjugué coloré. Une ligne colorée se forme dans la zone de test sur la membrane lorsqu'un échantillon positif réagit avec le conjugué de colorant anticorps-hCG spécifique. L'absence d'une ligne colorée indique un résultat négatif. Une ligne de contrôle s'affiche toujours comme contrôle de procédure.

CONSERVATION ET STABILITÉ

1. Conserver à 2 °C–30 °C dans le sachet scellé jusqu'à la date d'expiration indiquée sur l'étiquette. Si le test est conservé au réfrigérateur, il doit atteindre la température ambiante avant son utilisation.

REFERENSER

1. L. A. Bastian, K. Nanda, V. Hasselblad, and D. L. Simel, Diagnostic Efficiency of Home Pregnancy Test Kits: A Meta-analysis.

BETYDELSE AV SYMBOLER PÅ FÖRPACKNINGEN

- | | |
|--|---|
|  Température de stockage |  Numéro de lot |
|  Réservé au diagnostic in vitro |  Date d'expiration |
|  Attention ! Lire le mode d'emploi pour une utilisation correcte |  Fabricant |
|  Non réutilisable |  Contient suffisamment pour 1 test |
|  Représentant autorisé |  Conserver au sec |
|  Protéger de la lumière directe |  Numéro de catalogue |
|  Identification unique de l'unité |  Importateur |

2. Ouvrez le sachet quelques minutes seulement avant d'effectuer le test.
3. Conservez à l'abri de la lumière directe, de l'humidité et de la chaleur. N'utilisez pas le test si le sachet est percé ou n'est pas correctement scellé.
4. E PAS CONGELER.

CONTRÔLE DE QUALITÉ

Un contrôle de procédure est inclus dans le test. Une ligne rouge affichée dans la zone de contrôle (C) fonctionne comme contrôle de procédure interne. Elle confirme que les réactifs fonctionnent correctement, qu'une quantité suffisante d'échantillon a été utilisée et que la procédure a été suivie correctement.

Si le test n'affiche aucune ligne de contrôle ou de test dans la fenêtre, il doit être jeté. Répétez le test avec un nouveau test et suivez la procédure attentivement. Si le deuxième test n'affiche pas non plus de lignes, veuillez nous contacter.

LIMITES

1. Vous ne devez pas fonder l'évaluation de votre état clinique uniquement sur le résultat d'un test de grossesse.
2. Une faible concentration d'hCG au début d'une grossesse peut donner un résultat négatif. Recueillez un nouvel échantillon d'urine au plus tôt 48 heures plus tard et testez à nouveau.
3. Des niveaux élevés d'hCG peuvent être dus à d'autres

conditions que la grossesse. Par conséquent, la présence d'hCG dans l'urine ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer la grossesse avant que ces conditions aient été exclues.

4. Certaines conditions de santé, telles qu'un kyste ovarien ou une grossesse en dehors de l'utérus (grossesse extra-utérine), peuvent donner des résultats faux ou irréguliers.
5. Le test est destiné uniquement à la détection précoce de la grossesse.
6. Des niveaux élevés d'hCG ont également été détectés chez les patients atteints de maladie trophoblastique gestationnelle et non gestationnelle. Le cas échéant, ces conditions doivent être exclues avant d'établir un diagnostic de grossesse.
7. Une grossesse anormale ne peut pas être distinguée d'une grossesse normale uniquement par la mesure de l'hCG.
8. Les médicaments contenant de l'hCG (par exemple Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) peuvent donner un faux résultat positif.

PRÉCAUTIONS

1. Ces tests sont destinés exclusivement au diagnostic in vitro et à l'usage à domicile. Ne doit pas être ingéré.
2. Jeter après utilisation. Le bâtonnet de test ne peut être utilisé qu'une seule fois.
3. N'utilisez pas après la date d'expiration.
4. N'utilisez pas si le sachet n'est pas correctement scellé.
5. Tenir hors de la portée des enfants.
6. Lisez toutes les instructions attentivement avant l'utilisation.

Une mauvaise utilisation peut entraîner des résultats invalides.

7. Le produit n'est pas destiné à être utilisé comme contraceptif.
8. Il est toujours préférable de consulter un médecin avant de tenter une conception.
9. Les échantillons d'urine peuvent être infectieux ; assurez-vous de les manipuler correctement et de jeter tout le matériel de test utilisé conformément aux réglementations locales.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Sensibilité : Cette sensibilité a été confirmée à l'aide de normes d'hCG dans l'urine. Les résultats ont montré que la sensibilité analytique du test (la concentration la plus basse qui donne 100 % de résultats positifs) est de 25 mIU/mL.

Précision : Une étude clinique (OTC) a été menée. Des échantillons d'urine ont été collectés auprès de 24 participantes enceintes confirmées cliniquement et 76 participantes non enceintes. Les 24 échantillons de femmes enceintes ont tous testé positif avec le test de grossesse précoce Proov Check et ont également montré des résultats positifs avec le test de référence effectué par du personnel médical. Toutes les femmes non enceintes ont testé négatif avec le test de grossesse précoce Proov Check, et le personnel médical a également obtenu des résultats négatifs avec le test de référence.

proov/
check

Test de Grossesse
Précoce

Test de grossesse à domicile – pour la détection précoce de l'hCG

Mode d'emploi

1. Comment effectuer un test Proov hCG
2. Comment lire vos résultats
3. Que signifie votre résultat ?


Babyplan®

Lorsque les grands rêves se réalisent, ce sont souvent les petites choses qui font la différence. Laissez Babyplan vous aider à augmenter vos chances de concevoir.

Babyplan.fr

Version 1.0
FR 26062026

Test de grossesse précoce Proov Check RÉSERVÉ AU DIAGNOSTIC IN VITRO UNIQUEMENT

Qu'est-ce que l'hcg et que vous dit-il ?

Lorsque vous êtes enceinte, votre corps produit une hormone appelée hCG (gonadotrophine chorionique humaine). Les tests de grossesse précoces reposent généralement sur la détection ou la mesure de l'hCG. L'hormone se trouve dans l'urine peu après la fécondation et l'implantation et continue ensuite à augmenter.



À NOTER

Lisez toutes les informations dans la notice avant d'effectuer le test.

MATÉRIEL INCLUS

1. Bâtonnet de test
2. Mode d'emploi

MATÉRIEL REQUIS MAIS NON INCLUS

1. Montre ou minuterie
2. Récipient pour la collecte d'échantillons d'urine
3. Gants en latex

1. Comment effectuer un Test de Grossesse Précoce Proov

REMARQUE : Vous pouvez effectuer un test Proov Check avec n'importe quel échantillon d'urine, mais l'urine du matin est préférable car elle a la plus haute concentration d'hCG.

1: URINER

Recueillez votre échantillon d'urine dans une tasse propre et sèche.

REMARQUE: Conservez l'échantillon jusqu'à ce que vous ayez utilisé le bâtonnet de test et lu le résultat. De cette façon, vous pouvez facilement tester à nouveau avec le même échantillon s'il y a une erreur.

2: TREMPER


Retirez le bâtonnet de test de l'emballage en feuille et utilisez-le dès que possible.

Trempez le bâtonnet jusqu'aux flèches MAX et maintenez-le jusqu'à ce que vous voyiez l'urine commencer à monter (généralement environ 10 secondes).

3: ATTENDRE

Placez le bâtonnet sur une surface plane et non absorbante et laissez-le se développer pendant 5 à 10 minutes.

N'hésitez pas à utiliser une minuterie.

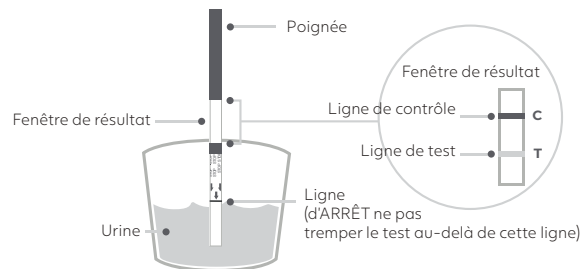

2. Comment lire votre résultat



POSITIF

Si deux lignes rouges claires apparaissent sur le test – peu importe la faiblesse de l'une – le test est positif, ce qui signifie que l'hCG est présente. Une ligne doit se trouver dans la zone de contrôle (C) et l'autre dans la zone de test (T).



NÉGATIF

Si une seule ligne apparaît dans la zone de contrôle (C), le résultat est négatif.



INVALIDE

S'il n'apparaît aucune ligne à tout moment pendant la procédure de test, ou si seule la ligne de test apparaît, le test n'a pas fonctionné correctement. Veuillez nous contacter dans ce cas.



Prenez une photo 5 à 10 minutes après avoir trempé le bâtonnet. Vous pouvez toujours revoir votre résultat. Avez-vous besoin d'aide ?

Nous serions heureux de vous aider :

proov@babyplan.com

3. Que signifie votre résultat ?

Résultats positifs

Un résultat positif au test de grossesse précoce Proov Check signifie très probablement que vous êtes enceinte. Nous recommandons de contacter votre médecin pour confirmer la grossesse et discuter des étapes suivantes. Si vous n'êtes pas sûr du résultat, testez à nouveau au plus tôt 48 heures après le premier test. La deuxième ligne devient plus foncée à mesure que le niveau d'hCG augmente après l'implantation.

Résultats négatifs

Un résultat négatif au test de grossesse précoce Proov Check peut signifier que vous n'êtes pas enceinte, que le niveau d'hCG n'est pas encore assez élevé pour être détecté, ou que vous avez peut-être mal calculé la date de vos règles attendues ou manquantes. Si vous n'êtes pas sûr du résultat ou si vous soupçonnez toujours une grossesse, testez à nouveau au plus tôt 48 heures après le premier test. Si vous êtes enceinte, la deuxième ligne devient plus foncée à mesure que le niveau d'hCG augmente après l'implantation. Si le test est toujours négatif après des règles manquées, contactez votre médecin.

Questions et Réponses

1. À quel moment après une suspicion de grossesse puis-je tester ?

Vous pouvez tester votre urine dès le premier jour où vos règles n'arrivent pas. Le test peut être effectué à tout moment de la journée, mais l'urine du matin contient la plus haute concentration de l'hormone de grossesse si vous êtes enceinte.

2. Dois-je tester avec l'urine du matin ?

Bien que vous puissiez tester à tout moment de la journée, l'urine du matin est généralement plus concentrée et contient donc plus d'hCG.

3. Quels facteurs peuvent affecter le résultat du test ?

Les médicaments contenant de l'hCG (par exemple Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL) peuvent donner un faux résultat positif. L'alcool, les pilules contraceptives, les analgésiques, les antibiotiques ou les traitements hormonaux ne contenant pas d'hCG ne devraient pas affecter le résultat.

4. Un résultat positif signifie-t-il autre chose qu'une grossesse normale ?

Oui, certaines conditions médicales ou médicaments peuvent également donner un résultat positif. Par conséquent, contactez toujours votre médecin en cas de résultat de test de grossesse positif.

5. Comment savoir que le test a été effectué correctement ?

L'apparition d'une ligne rouge dans la fenêtre de contrôle (C) montre que vous avez suivi correctement la procédure de test et que la bonne quantité d'urine a été absorbée.

6. Que faire si le résultat montre que je ne suis pas enceinte ?

La concentration d'hCG varie beaucoup au début de la grossesse. Si vous n'avez pas vos règles dans une semaine après la date prévue, vous devriez répéter le test avec un nouveau bâtonnet. Si le résultat est toujours négatif et que vos règles ne viennent pas, contactez votre médecin.